


## 1140 GANT NITRILE KOLMI COVERFEEL TOUCH - SANS POUDRE

Dispositif Médical de Classe I et Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

### CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Sans accélérateur pour limiter les allergies de type IV.
- Gant ultra confortable et enfilage plus rapide grâce à son revêtement polymère interne.
- Grande élasticité et bonne dextérité.
- Texture non glissante pour une excellente préhension et manipulation des objets.
- Gant étanche à l'eau et à l'air.

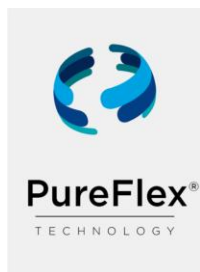

### USAGE PRÉVU

- Gant destiné à un usage professionnel.
- En milieu médical, ce gant s'utilise pour faire barrière contre les micro-organismes, entre le personnel soignant, le patient, et leur environnement. Protection testée (perméation) contre de nombreux agents de chimiothérapie (oncologie).
- En milieu industriel, ce gant est destiné à protéger le porteur des produits chimiques testés (type B) et des microorganismes (bactéries, moisissures et virus).
- Sans poudre, il réduit les risques de contaminations aéroportées et limite les risques d'irritation.
- Sans latex naturel, ce gant est recommandé pour les personnes allergiques à celui-ci.
- Ce gant est apte au contact alimentaire pour tous types de denrées.

### DESRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Kolmi Coverfeel Touch
Type de produit :	Gant à usage unique, non stérile
Matière :	Nitrile
Couleur :	Bleu
Forme :	Ambidextre
Bord :	Roulé
Texture :	Doigts texturés
Poudré :	Non
Épaisseur de la paume :	0,07 mm (±0,02mm)
Épaisseur du doigt :	0,08 mm (±0,02mm)
Longueur du gant :	≥ 240 mm
	≥ 250 mm pour XL & XXL
Poids unitaire (M) :	3,5g
AQL:	1,5
Pays de fabrication :	FRANCE  
Conditionnement:	Boîte de 100uc - Tailles XS, S, M & L Boîte de 90uc – Tailles XL & XXL

Article	Taille	
1140-A	T6	XS
1140-B	T7	S
1140-C	T8	M
1140-D	T9	L
1140-E	T10	XL
1140-F	T11	XXL

## CERTIFICATIONS & NORMES

- Conçu et distribué sous un système qualité certifié ISO 13485 & ISO 9001.
- Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745, relatif aux dispositifs médicaux.
- Répond aux normes EN 455-1/2/3/4 pour les gants médicaux non réutilisables.
- Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425, relatifs aux équipements de protection individuelle.
- Répond aux normes EN ISO 21420, EN ISO 374-1/2/4/5, EN 16523-1, ISO 16604 pour la protection contre les produits chimiques testés (type B), les micro-organismes dont les virus.
- Conforme aux exigences du Règlement (CE) 1935/2004, et de l'Arrêté français du 05 août 2020. Ce gant est apte au contact alimentaire pour tous type de denrée.
- Testé selon l'ASTM D6978-05 pour l'évaluation de la résistance des gants médicaux à la perméation par les médicaments de chimiothérapie testés.
- Propriétés électrostatiques: testé selon les normes EN 1149-1, EN 1149-2 & EN 1149-3 (résultats sur demande).

Données de perméation chimique (EN 16523-1:2015+A1:2018)		
Produit chimique testé	N° CAS	Niveau de performance/ Temps de traversée
J: n-Heptane	142-82-5	Niveau 3, < 120 min
K: Hydroxyde de sodium 40%	1310-73-2	Niveau 6, > 480 min
T: Formaldéhyde 37%	50-00-0	Niveau 5, > 480 min

Résistance aux produits cytotoxiques (ASTM D6978-05)	
Molécules cytotoxiques et concentration	Temps minimal de détection d'un trou
Carmustine (BCNU) - 3.3 mg/ml	21,7 min
Doxorubicin HCl - 2.0 mg/ml	> 240 min
Cyclophosphamide - 20 mg/ml	> 240 min
Paclitaxel - 6.0 mg/ml	> 240 min
Thiotepa - 10.0 mg/ml	54,3 min
Etoposide - 20.0 mg/ml	> 240 min
Fluorouracil - 50.0 mg/ml	> 240 min
Bulsulfan - 6mg/ml	> 240 min
Irinotecan HCl - 20mg/ml	> 240 min
Vidaza (Azacytidine) - 25 mg/ml	> 240 min
Fentanyl citrate injection - 100mcg/2ml	> 240 min
Methotrexate - 25mg/ml	> 240 min
Vincristine Sulfate - 1mg/ml	> 240 min
Ifosfamide - 50mg/ml	> 240 min
Cytarabine HCl - 100mg/ml	> 240 min



PRECAUTIONS

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.  
A usage unique, ne pas réutiliser.  
Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

COMPOSITION DU DISPOSITIF

Nitrile – sans sulfure ni accélérateur  
Latex: non  
BPA: non  
Phtalates CMR: non  
Produit d'origine animale ou végétale: non  
Présence d'oxyde d'éthylène: non

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil.  
Durée de vie du produit : 3 ans.

MARQUAGE SUR LE PACKAGING



INFORMATIONS LOGISTIQUES

SPECIFICATIONS CARTON					SPECIFICATIONS BOITE		
Article	TAILLE (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	BARCODE	TAILLE (mm)	QTE / carton	BARCODE
1140-A	L344 x l256 x H270	3,2	60 cartons (6 couches de 10 cartons)	3 662 036 020 758	L250 x l121 x H64	10 boîtes distributrices de 100 unités	3 662 036 020 901
1140-B		3,7		3 662 036 020 765			3 662 036 020 918
1140-C		4,2		3 662 036 020 772			3 662 036 020 925
1140-D		4,7		3 662 036 020 789			3 662 036 020 932
1140-E		5		3 662 036 020 796		10 boîtes distributrices de 90 unités	3 662 036 020 949
1140-F		5,4		3 662 036 020 963			3 662 036 020 956

