



Normes

TYPE 3 14605	TYPE 4 14605	TYPE 5 13982-1	TYPE 6 13034	EN 1149-5	EN 1073-2	EN 14126

Caractéristiques



Capuche 3 pièces pour une liberté de mouvement



Passe-pouce élastiqué pour éviter aux manches de remonter



Double rabat adhésif avec mentonnière




Fermeture à glissière avec anneau


- Double protection sur la face avant
- Matière anti statique, facilitant la dissipation des charges électrostatiques
- Matériau et coutures hautement étanches aux projections intenses
- Protège des produits chimiques inorganiques ainsi que des risques biologiques
- Combinaison parfaitement ajustée au corps et aux mouvements

Matériau et Couture

MATÉRIAU POLYÉTHYLÈNE HD ET SMS

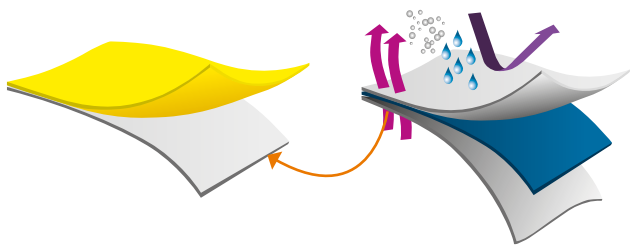

COUTURE THERMOCOLLÉE

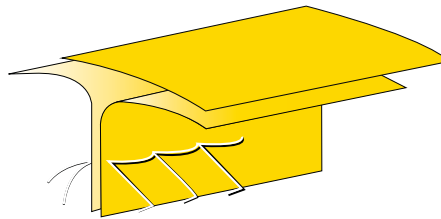

Applications

- Industries pétrochimiques
- Nettoyage industriel de cuves et de déversement d'huiles
- Épidémies et virus, ainsi que les services d'urgence
- Assainissement des eaux polluées, dépollution de sites pollués et réhabilitation des sols
- Maintenance Offshore
- Industries chimiques et nucléaires

FICHE TECHNIQUE WEEJET

REF : WL-J1-0X



DESRIPTIF : Combinaison avec cagoule, taille, poignets et chevilles élastiqués.

Passerelle élastiquée.

Double Rabat autocollant sur fermeture à glissière. Mentonnière

MATERIAUX ET COUTURE : PEHD jaune sur la couche externe, et SMS sur la couche interne 88 GM2

Couture thermocollée plastifiée

PROPRIETES PHYSIQUES DU TISSU			
Propriétés physiques du tissu	Méthode test	Résultats	Classe
Résistance à l'abrasion	EN530	>2000 cycles	Classe 6
Résistance à la flexion	ISO 7854 B	>100 000	Classe 6
Résistance à la déchirure	ISO 9073-4	40 N / 60 N	Classe 3
Résistance à la traction	ISO 13934-1	60 N / 100 N	Classe 2
Résistance à la perforation	EN863	10 N / 50 N	Classe 2
Résistance aux flammes	EN 13274-4	Réussi	
RÉSISTANCE DU TISSU À LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDES EN ISO 6530			
Propriétés chimiques du tissu		Pénétration	Répulsion
Acide sulfurique 30%		Classe 3	Classe 3
Hydroxyde de sodium 10%		Classe 3	Classe 3
O-Xylène		Classe 3	Classe 3
Bulan-1-ol		Classe 3	Classe 3
RÉSISTANCE DU TISSU ET DES COUTURES RECOUVERTES À LA PERMÉATION DE LIQUIDE EN ISO 6529			
Produits chimiques testés	Produits équivalents	Temps de passage (min)	Classe
Acide sulfurique 96%	Huile de vitriole	> 480 min	Classe 6/6
Acide Phosphorique à 85%		> 480 min	Classe 6/6
Acide Nitrique à 70%		> 480 min	Classe 6/6
Hydroxyde de Sodium 50%	Soude caustique Lessive de soude	> 480 min	Classe 6/6
Acide Fluoridrique 37%		> 480 min	Classe 6/6
Acide Hydrochlorique 32%		> 480 min	Classe 6/6
RÉSISTANCE DU TISSU À LA PÉNÉTRATION D'AGENTS INFECTIEUX EN14126			
Résistance à la pénétration par des pathogènes transmissibles par le sang ISO16604 / ISO 16603			Classe 6/6
Résistance à la pénétration par des liquides contaminés EN ISO22610			Classe 6/6
Résistance à la pénétration par des aérosols biologiquement contaminés EN ISO22611			Classe 3/3
Résistance à la pénétration par des particules solides contaminées ISO22612			Classe 3/3





PERFORMANCES DES TESTS COMBINAISON ENTIERE	
Test de projections liquides Type 3B , selon la méthode EN14605 : 2005 + A1 : 2009	Réussi
Test de pulvérisation à densité élevée Type 4B Selon la méthode EN14605 : 2005 + A1 : 2009	Réussi
Test de résistance à la poussière Type 5B Selon la méthode EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Réussi
Test de pulvérisation à faible densité Type 6B Selon la méthode EN 13034 : 2005 +A1: 2009	Réussi
Protection contre les risques biologiques EN14126 : 2003 + AC 2004	Réussi
Protection contre les particules radioactives EN1073-2 :2002	Classe 1
Protection électrostatique lors d'une mise à terre EN1149-5 :2008	Réussi
Solidité des coutures selon la méthode ISO 13935-2	Classe 4

TABLEAU DES TAILLES			
Taille	Référence WeeSafe	Hauteur	Tour de poitrine
M	WL-J1-02	170-176 cm	92-100 cm
L	WL-J1-03	176-182 cm	100-108 cm
XL	WL-J1-04	182-188 cm	108-116 cm
XXL	WL-J1-05	188-194 cm	116-124 cm

CONDITIONNEMENT				
	Unités	Poids	Dimensions	Volume
Carton	25	13 KG	50 X 30 X 45 CM	0,0682 ^{M3}
Palette	400	208 KG	80 X 120 CM	1.0912 ^{M3}

GENCOD									
CARTON	M	3701012801933	L	3701012801797	XL	3701012801810	XXL	3701012801834	XXXL
SACHET		3701012801926		3701012801780		3701012801803		3701012801827	
CODE DOUANIER : 6210109800									